

WIDEX MOMENT™ sRIC R D AVEC ÉCOUTEUR M RIC V.2



L'aide auditive WIDEX sRIC R D appartient à la gamme WIDEX MOMENT™. Conçue autour du circuit WIDEX MOMENT™ pour offrir un meilleur son via TruAcoustics™ et le révolutionnaire paradigme Widex PureSound™, le tout sur une toute nouvelle plateforme avec une plus grande connectivité.


Programmer sRIC est plus facile que jamais, grâce à TruAcoustics™ qui restitue un son personnalisé. L'aide auditive WIDEX sRIC R D dépasse les défis de programmation des adaptations ouvertes/avec événements pour une perte auditive légère à modérée avec le paradigme Widex PureSound™.

L'aide auditive sRIC est alimentée par une batterie lithium-ion intégrée et rechargeable via le chargeur sRIC correspondant ou le modèle Charge n Clean.

WIDEX offre un tout nouveau design et un modèle d'aide auditive dans des couleurs unies. La prise en charge de l'application se fait via la connexion bluetooth directe à iOS et Android, ce qui permet également une connexion à TV PLAY.

- Connectivité mobile directe sans fil (2,4 GHz)
- Compatible avec les appareils d'aide à l'écoute DEX
- 3 niveaux de performance : 440/330/220
- Utilise Easyware V.2 écouteur M
- Fonctionne avec un écouteur à la fois de taille plus petite et plus puissant qui couvre une plage d'application plus large
- Alimentée par une batterie lithium-ion rechargeable
- Perte auditive légère à modérée
- Classe de protection IP68

PLAGE D'APPLICATION SUGGÉRÉE

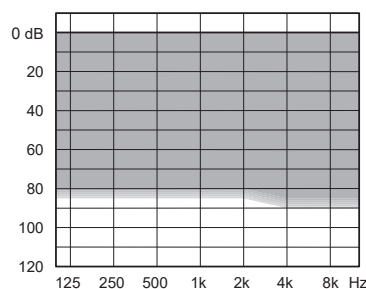

TECHNOLOGIE STANDARD

- Circuit WIDEX MOMENT™ avec intégrateur de gain personnel et technologie ZeroDelay™
- Widex PureSound™ — un nouveau paradigme dans le traitement du son
- TruAcoustics™ pour un son et une programmation meilleurs
- Nouvelles tonalités Zen/Relax dans l'aide auditive

FONCTIONNALITÉS CLÉS	440	330	220
Performance	*****	*****	****
Canaux de traitement et de réglage fin	15	12	10
Widex PureSound™ avec la technologie ZeroDelay™	•	•	•
TruAcoustics™ avec intégrateur de gain personnel	•	•	•

CONNECTIVITÉ

Contrôle 2,4 GHz (Android et iOS)	•	•	•
Streaming audio 2,4 GHz (iOS)*	•	•	•
WidexLink pour les appareils auxiliaires d'aide à l'écoute DEX**	•	•	•

APPLICATIONS POUR iOS ET ANDROID

Application MOMENT avec SoundSense Learn	•	•	•
Application MOMENT	•	•	•
Application TONELINK	•	•	•
Application COM-DEX	•	•	•


FONCTIONNALITÉS

Gestionnaire de l'adaptation	•	•	•
Contrôle de la transition sonore (classes de sons)	11 (IE)	7 (IE)	4
Programmes	5	4	3
Gestion du bruit du vent Smartwind	•		
Boost des fréquences hautes	•		
Mise en évidence de la parole TR	TR/IE	IE	
Pavillon virtuel	•	•	
Locator HD	•	•	•
Atténuateur TruSound	•	•	•
SoundSense Adapt	•	•	•
Contrôle de préférence	•	•	•
Bouton-poussoir programmable***	•	•	•
Réducteur de bruit de niveau faible	•	•	•
Réducteur de bruit	•	•	•
Zen/Relax	•	•	•
Transposition fréquentielle	•	•	•


*Prêt pour le streaming Android direct. **Inclut également les appareils auxiliaires d'aide à l'écoute DEX : TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, TV-PLAY. ***Programmable : En tant que bouton de sélection des programmes et interrupteur marche/arrêt, En tant que bouton de réglage du son et interrupteur marche/arrêt, En tant qu'un interrupteur marche/arrêt dédié.

Pour plus d'informations en ce qui concerne les appareils WIDEX MOMENT compatibles avec le streaming direct, veuillez consulter : global.widex.com/compatibility


SORTIE MAXIMUM - SIMULATEUR D'OREILLE

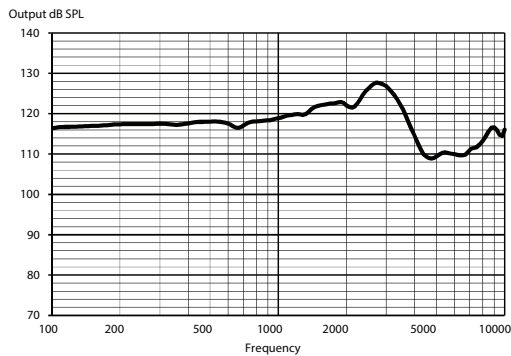


SORTIE MAXIMUM - COUPLEUR 2CC

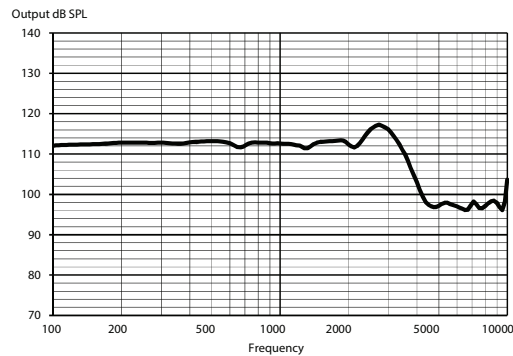

SORTIE - SIMULATEUR D'OREILLE

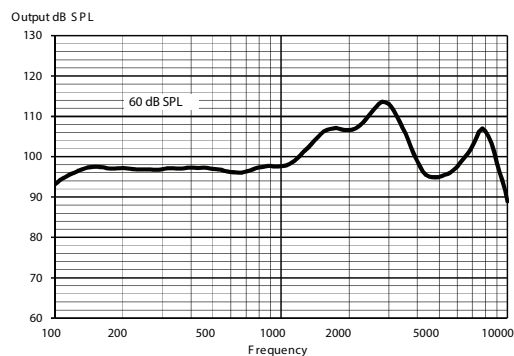

SORTIE - COUPLEUR 2CC

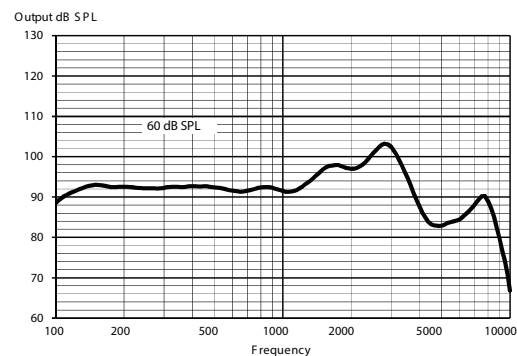

Données techniques :

Données typiques obtenues par des mesures en son pur standard. L'aide auditive est réglée sur Gain test de référence de Compass, sauf indication contraire. Mesurées au moyen d'un coupleur intra-auriculaire standard sans pare-cérumen. Pour plus d'informations, veuillez contacter Widex sur global.widex.com.

		SIMULATEUR D'OREILLE CEI 60118-0:1983 + A1:1994	COUPLEUR 2CC CEI 60118-0:2015 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Crête Moyenne	122 dB SPL 128 dB SPL 120 dB SPL	113 dB SPL 117 dB SPL 114 dB SPL
Sortie acoustique (Entrée 60 dB SPL)	1600 Hz Crête Moyenne	107 dB SPL 114 dB SPL 100 dB SPL	98 dB SPL 103 dB SPL 97 dB SPL
Gain total (Entrée 50 dB SPL, Gain total de Compass)	1600 Hz Crête Moyenne	67 dB 69 dB 64 dB	58 dB 61 dB 57 dB
Gamme de fréquence acoustique		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 9200 Hz
Distorsion harmonique (typique)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	< 2 % < 2 % < 2 %	< 2 % < 2 % < 2 %
Bruit équivalent à l'entrée		19 dB SPL	20 dB SPL
Consommation de la pile (veille)		1,18 mA	1,18 mA
Consommation de la pile*		1,25 mA	1,28 mA
Autonomie de la pile* Pile lithium-ion rechargeable		40 h	40 h
Immunité face aux interférences provenant des téléphones portables (CEI 60118-13:2019 Ed. 5.0, ANSI C63.19:2019)		CEI : Observateur et utilisateur : En conformité	ANSI : En conformité

*La durée de vie de la pile en situations réelles dépend entre autres des fonctionnalités utilisées de l'aide auditive et du temps de streaming.

Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant. Les pièces détachées et les instructions nécessaires pour la réparation peuvent être obtenues auprès de Widex.